



Lue käyttöohje ennen käyttöä! On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö, ennen kuin yrität käyttää laitetta.

**CE**

2020-10-30

Asiakirjan numero: M10-466FI rev.01

## Käyttötarkoitus

---

Jalkahihna potilaan jalkojen kiinnittämiseen leikkauksen aikana. Tuote on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön terveydenhuollon yksikössä.

## Käyttöohjeet

---

### Käyttö

Vie hihnan pää sivukiskon ympäri leikkauspöydän kummallakin puolella. Kiristä hihna potilaan jalkojen yli ja lukitse se paikalleen tarranauhalla.

### Puhdistaminen

Puhdista antiseptisellä pesuaineella (pH 6–8) ja lämpimällä vedellä. Pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaasti hapanta tai emäksistä pesuainetta.

### Tarkistaminen

Tarkista ennen käyttöä, että jalkahihna on puhdas ja ehjä.

## Tekniset tiedot

---

Tuotenro	Kuvaus	UDI-DI	Mitat (L x P)	Paino	Materiaali
10-466	Jalkahihna	07350111832124	90 x 1 500 mm	0,2 kg	Teryleeni



Reison Medical AB  
Eriksbergsvägen 32A  
734 92 Hallstahammar  
RUOTSI

+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)

medi<sup>+</sup>  
HEALTH

Tilaukset: [tilaukset@medihealth.fi](mailto:tilaukset@medihealth.fi) Tiedustelut: [info@medihealth.fi](mailto:info@medihealth.fi)  
Medihealth Oy, Haarasuonkuja 5 90240 Oulu, y-tunnus 3131118-6, [www.medihealth.fi](http://www.medihealth.fi)