



Versio	Kuvaus
10-553	Pehmustettu suojus käsivarren ja jalan tukeen 10-552
10-555	Pehmustettu suojus käsivarren ja jalan tukeen 10-554
10-557	Pehmustettu suojus käsivarren ja jalan tukeen 10-556



Lue käyttöohje ennen käyttöä! On tärkeää, että ymmärrät käyttöohjeen sisällön, ennen kuin yrität käyttää laitetta.

CE

15.12.2021

Asiakirjan numero: M10-553/555FI rev.02

Käyttötarkoitus

Suojus on tarkoitettu käsivarren ja jalan tukeen parantamaan potilasmukavuutta ja antamaan tukea leikkauksen aikana. Tuote on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön terveydenhuollon yksikössä.

Käyttöohjeet

Puhdistaminen

Puhdista antiseptisellä pesuaineella (pH 6–8) ja lämpimällä vedellä. Pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaasti hapanta tai emäksistä pesuainetta.

Tarkistaminen

Tarkista ennen käyttöä, että suojus on puhdas ja ehjä.

Tekniset tiedot

Versio	Kuvaus	UDI-DI	Mitat (K x L x P)	Paino	Materiaali
10-553	Suojus	07350111832186	240 x 20 x 580 mm	0,20 kg	Mfoam
10-555	Suojus	07350111832193	180 x 20 x 410 mm	0,10 kg	Mfoam
10-557	Suojus	07350111832674	240 x 20 x 315 mm	0,10 kg	Mfoam



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
RUOTSI

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se

medi⁺
HEALTH

Tilaukset: tilaukset@medihealth.fi Tiedustelut: info@medihealth.fi
Medihealth Oy, Haarasuonkuja 5 90240 Oulu, y-tunnus 3131118-6, www.medihealth.fi